

Användarmanual

 FLEXray



Vridbar hållare till film- & bildplattor

 STREETdent.com

Street Dent AB

Innehållsförteckning

Inledning.....	3
Användning, Rengöring & Garanti.....	4
Färgkodning.....	5

Positionering

Liggande bitewing.....	6
Stående bitewing.....	10
Front.....	14
Apikal.....	16

Inledning

FLEXray är en unik röntgenhållare för film- & bildplattor framtagen av Street Dent AB som produceras i Sverige. Tack vare sitt vridbara huvud behöver användaren enbart två hållare för att kunna ta alla bilder så som liggande och stående bitewing, apikal front samt molarbilder. Flexray bitewing finns med både kort och långt skaff.

FLEXray är färgkodad för enkel och snabb identifiering för användaren vilket effektiviserar arbetet. Huvudet på hållaren är gjort i ett flexibelt material vilket gör det möjligt att passa in ett stort antal olika film- & bildplattor från skilda tillverkare. (Komplett lista över film- & bildplattor som passar FLEXray är under ständig påbyggnad och skrivs därför inte ut här, kontakta Street Dent AB eller din distributör för mer information)

Huvudet på FLEXray är utformat så att man kan skjuta film- eller bildplattan i hållaren för att anpassa läget för bildtagningar. Huvudet är utformat för att passa film- & bildplattor av storlek #0, #1 och #2.

Skaffet på FLEXray är gjort i ett styvt material för ökad precision med en siktpinne som används vid liggande och stående bitewing. På skaffet finns även en greppyta för att få bättre sikt och enklare applicera hållaren i patientens mun.

FLEXray är återanvändningsbar, läs mer på sida 4.

Användning

FLEXray skall endast användas för tandröntgen av utbildad och tränad personal.

Tillverkaren tar inget ansvar för annan användning.

FLEXray är anpassad för att passa flera olika tillverkares film- & bildplattor. För komplett lista på film- & bildplattor som FLEXray passar till, kontakta Street Dent AB eller din distributör.

Användaren ansvarar för att FLEXray passar sitt system.

Skyddspåse skall alltid användas för att skydda film- eller bildplattan vid bildtagning.

Produkten skall rengöras före första användning, detta kan göras genom autoklivering, desinfektor eller sprittorkning. Återanvändning utan desinficering innebär ökad risk för kontaminering och smittspridning.

Rengöring

Alla ingående delar avsedda för tandröntgen är autoklaverbara, och skall autoklaveras var för sig. Steriliseringsprogram enligt autoklavtillverkarens instruktioner.

Ej varmare än 134°C.

Hållaren skall placeras i mitten av autoklaven. Om hållaren utsätts för tryck eller vikt från andra objekt under autoklaveringen kan hållaren bli deformerad. Mindre deformation kan åtgärdas genom att böja tillbaka hållaren. Plastens egenskaper påverkas av autoklivering vilket medför en begränsad livslängd för produkten.

Garanti


FLEXray är tillverkad av noga utvald plastråvara för att hålla hög kvalitet för ökad livslängd och för att bibehålla dess unika egenskaper. Alla plastprodukter har dock begränsad livslängd och bör ersättas med jämna mellanrum. Alla former av rengöring förkortar produktens livslängd.

Street Dent AB garanterar att produkten fungerar enligt anvisningar under 1 år eller högst 75 autoklaveringar / rengöringstillfällen i desinfektor.

Om produkten uppvisar brister eller fel under denna period så ersätts köparen med ny produkt.

Färgkodning

FLEXray Violet (VI)
Liggande & Stående bitewing
Film- & bildplattor storlek #0, #1 & #2

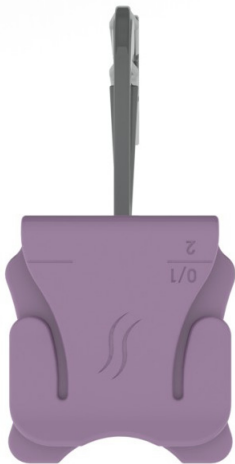


Film- & bildplattor storlek #2 skjuts ända in i hållaren
Film- & bildplattor storlek #0 & #1 skjuts fram till markeringen

FLEXray Cerise (CE)
Front samt apikal.
Film- & bildplattor storlek #0, #1 & #2




Positionering

Liggande bitewing

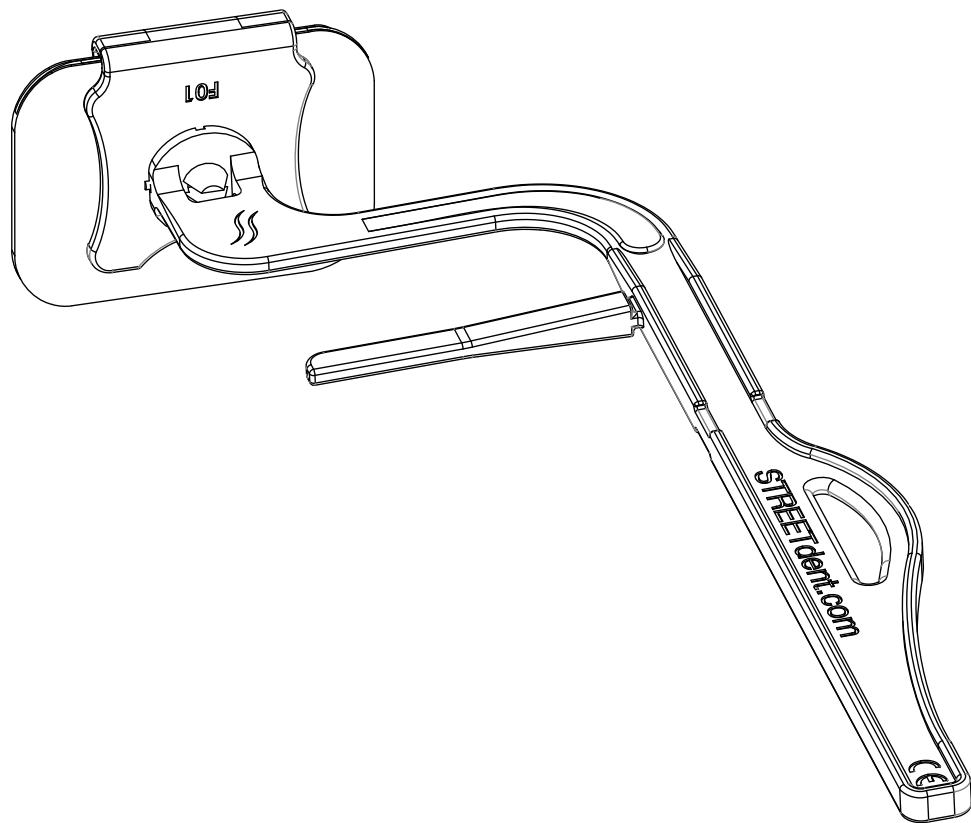


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

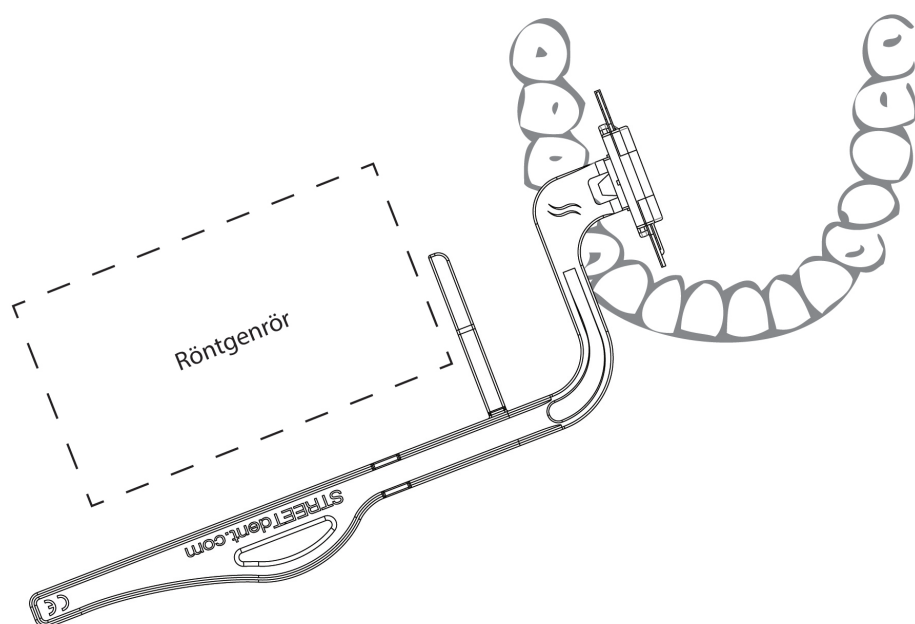

Liggande Bitewing - Premolar


Placera mitten på film- / bildplattan vid andra premolaren och centrera röntgenröret gentemot riktpinnen på hållaren.

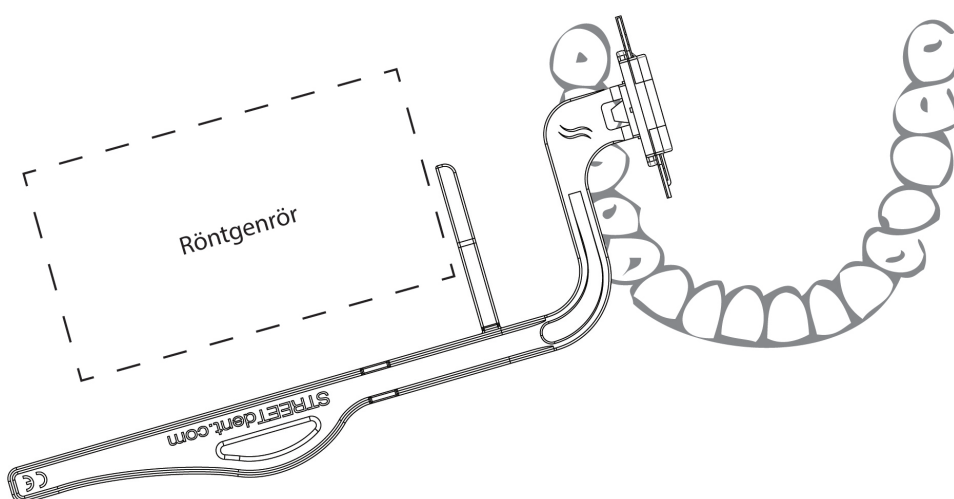


Liggande Bitewing - Molar

Placera mitten på film- / bildplattan mellan första och andra molaren och centrera röntgenröret gentemot riktpinnen på hållaren.

Liggande bitewing

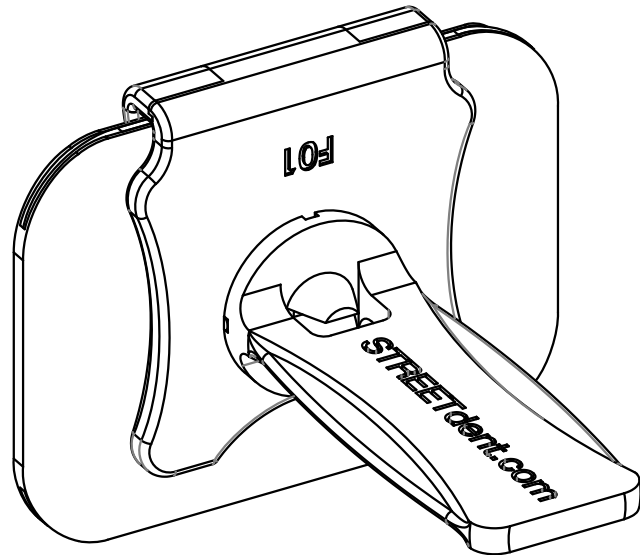


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

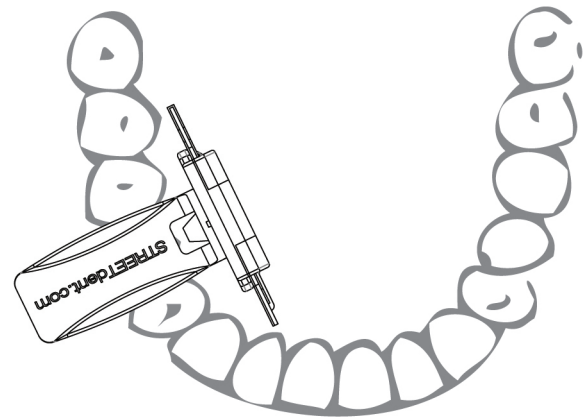

Liggande Bitewing - Premolar


Placera mitten på film- / bildplattan vid andra premolaren och centrera röntgenröret gentemot film- / bildplattans mitt.

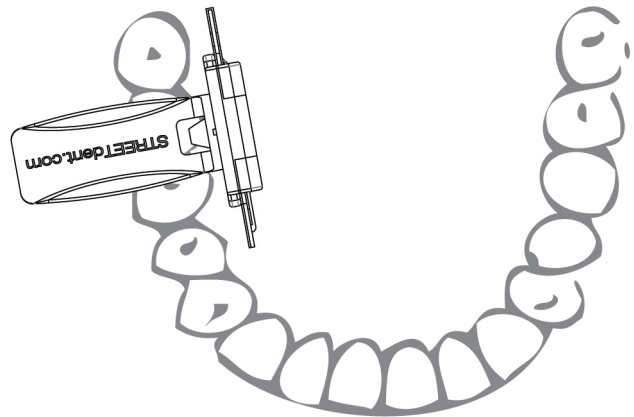


Liggande Bitewing - Molar

Placera mitten på film- / bildplattan mellan första och andra molaren och centrera röntgenröret gentemot.

Stående bitewing

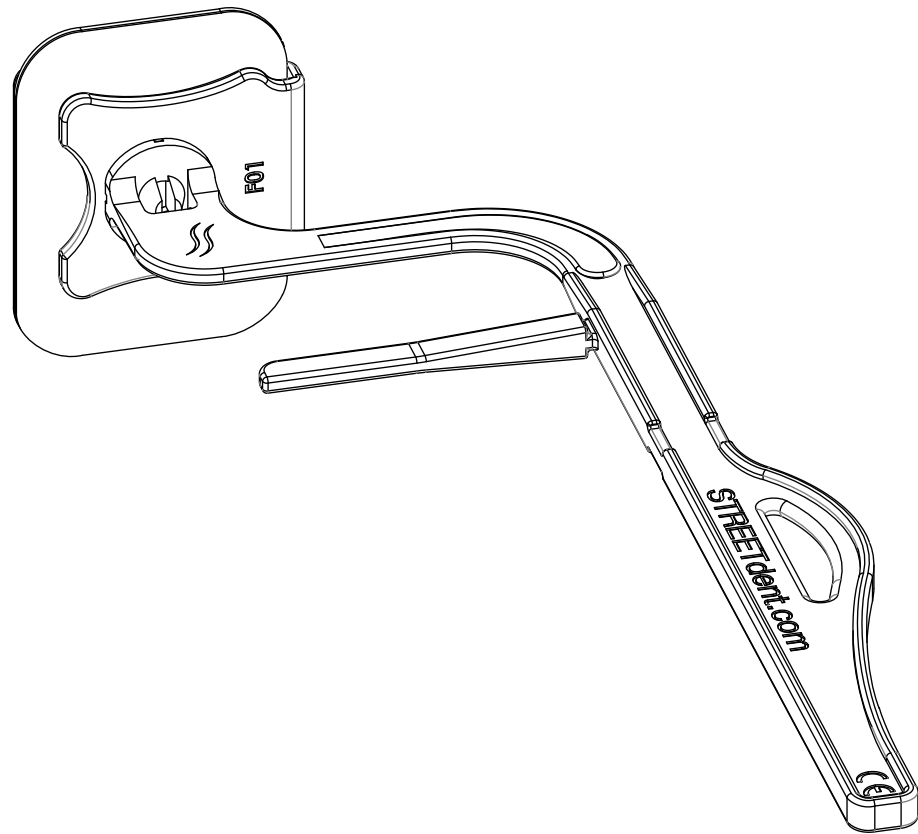


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

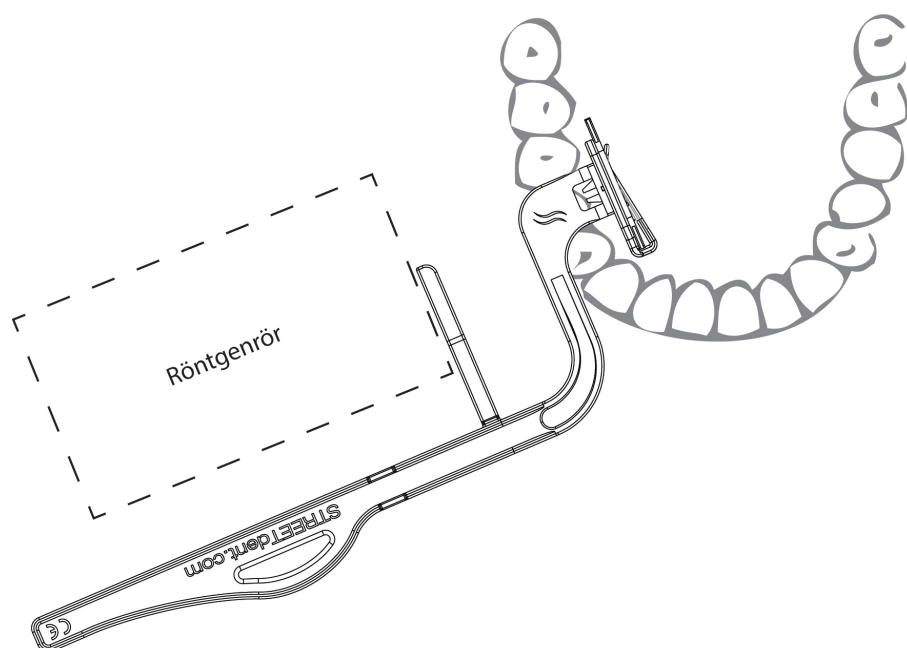

Stående Bitewing - Premolar


Placera mitten på film- / bildplattan vid andra premolaren och centrera röntgenröret gentemot riktpinnen på hållaren.

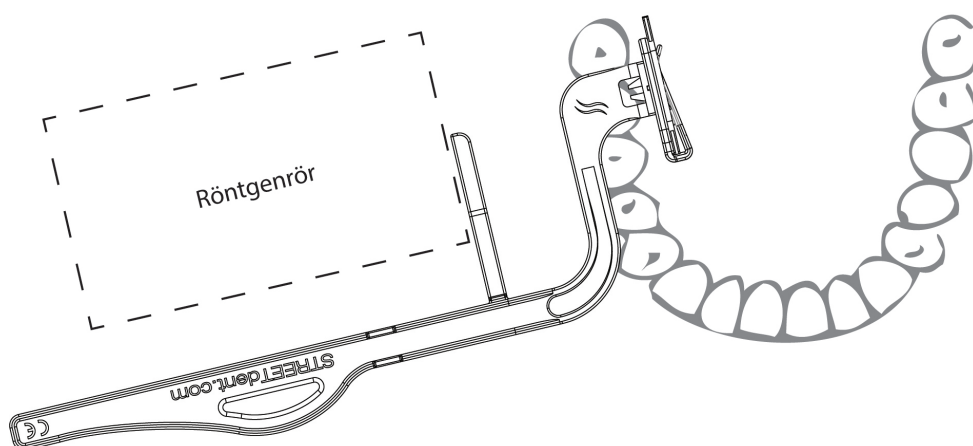


Stående Bitewing - Molar

Placera mitten på film- / bildplattan mellan första och andra molaren och centrera röntgenröret gentemot riktpinnen på hållaren.

Stående bitewing

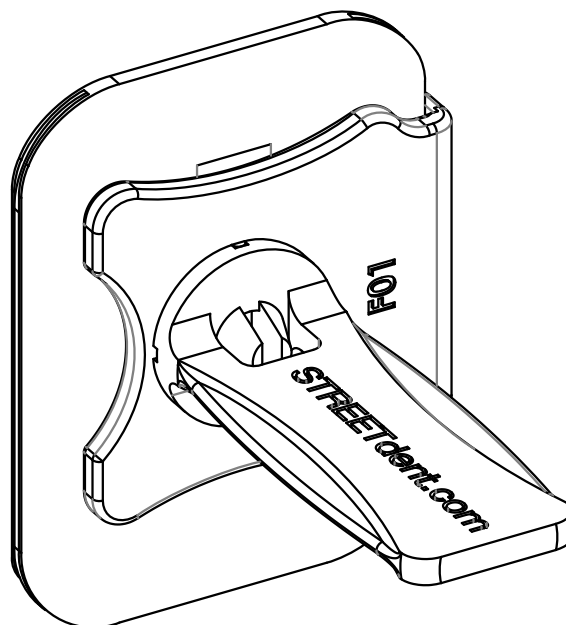


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

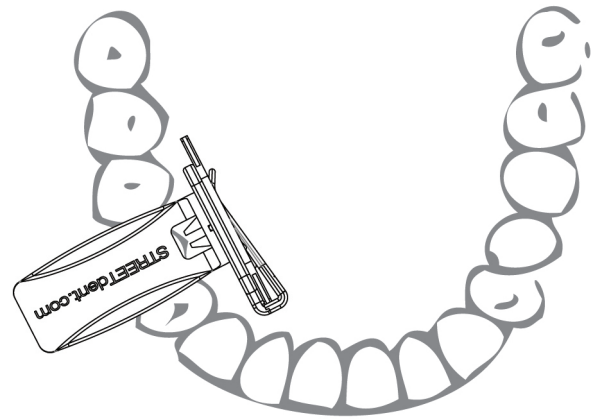

Stående Bitewing - Premolar


Placera mitten på film- / bildplattan vid andra premolaren och centrera röntgenröret gentemot film- / bildplattans mitt.

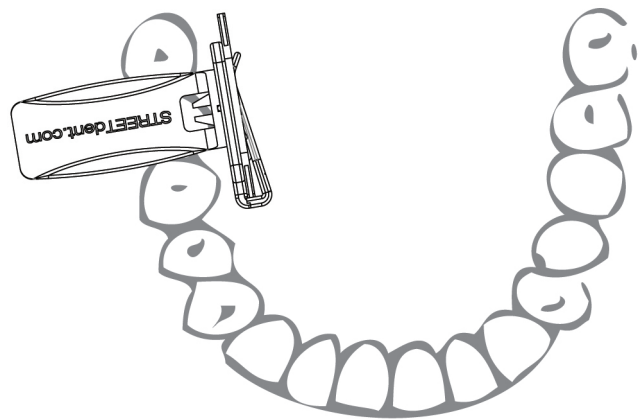

Stående Bitewing - Molar


Placera mitten på film- / bildplattan mellan första och andra molaren och centrera röntgenröret gentemot film- / bildplattans mitt.

Front - Underkäke

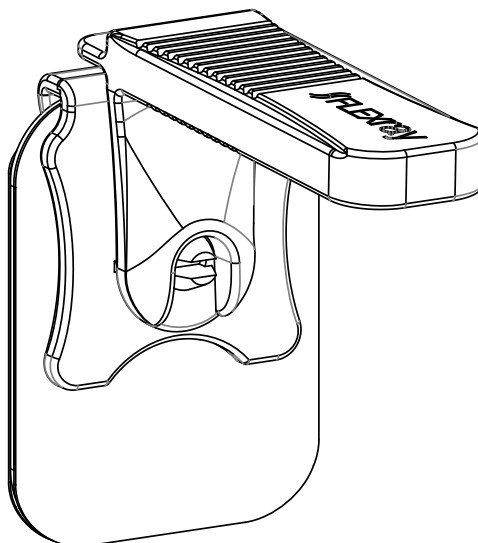


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

Front - Överkäke

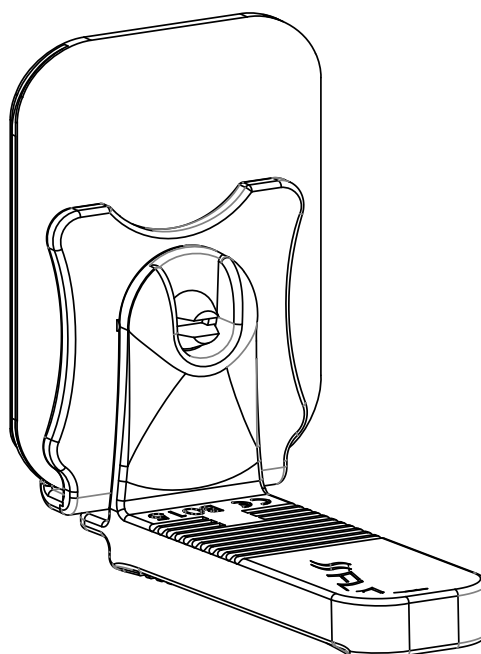


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

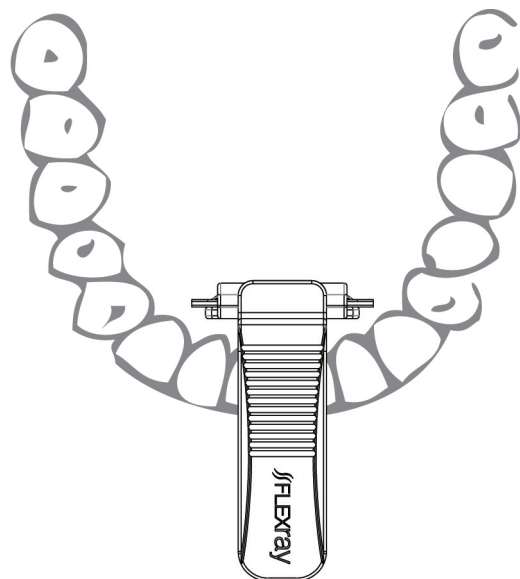

Incisiv


Placera mitten på film- / bildplattan mellan incisiverna och centrera röntgenröret mot film- / bildplattans mitt.

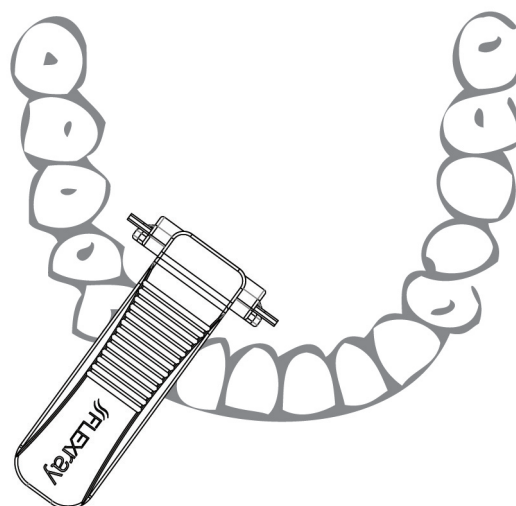

Cuspid


Placera mitten på film- / bildplattans mellan hörntanden och första premolaren och centrera röntgenröret mot film- / bildplattans mitt.

Apikal - Underkäke

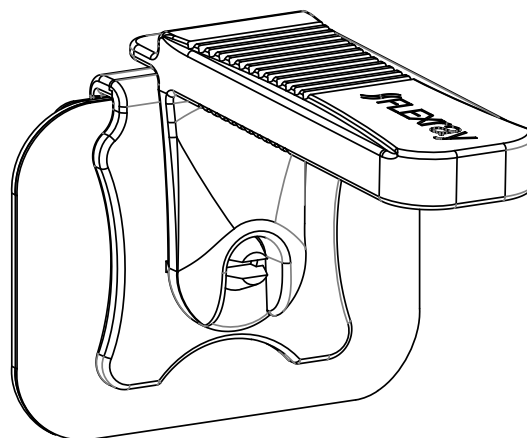


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

Apikal - Överkäke

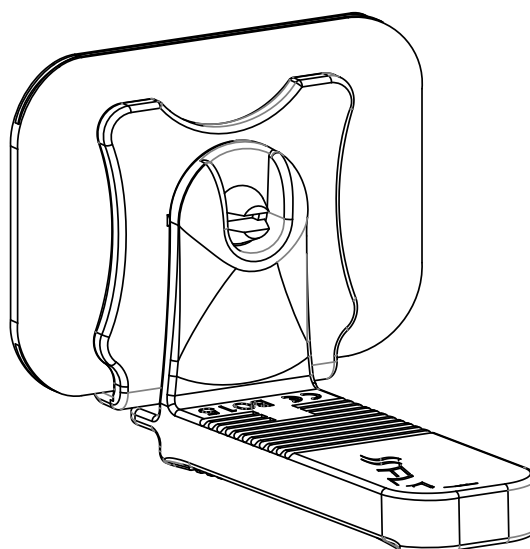


Placera film- / bildplattan i hållaren som bilden visar.

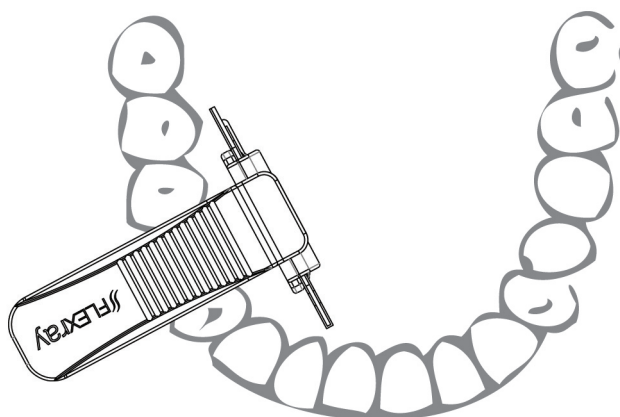

Apikal - Premolar

Placera mitten på film- / bildplattan vid andra premolaren och centrera röntgenröret mot film- / bildplattans mitt.

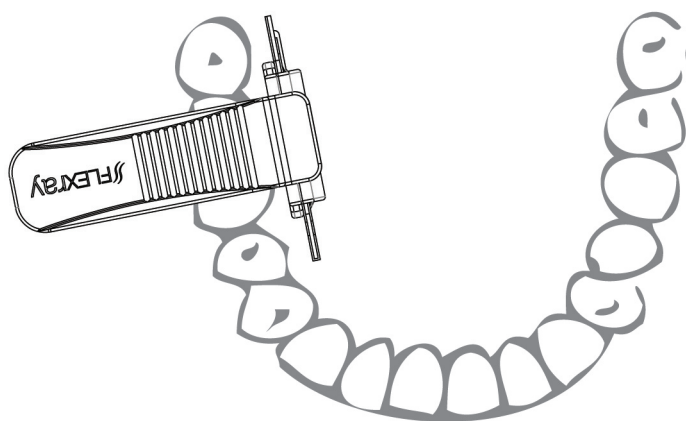

Apikal - Molar

Placera mitten på film- / bildplattan mellan första och andra molaren och centrera röntgenröret mot film- / bildplattans mitt.